



подушка-массажер

ДОБРЫЙ ПОПУТЧИК



Модель AMG392

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации



ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с удачной покупкой и благодарим за выбор продукции компании Gezatone!

Массаж является древнейшим приемом снятия напряжения, усталости, недомогания, стресса. Подушка-массажер Gezatone «Добрый попутчик», модель AMG392 незаменим для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего восстановления и тонизации организма. Подушка-массажер Gezatone «Добрый попутчик», модель AMG392 имеет эргономичный дизайн, идеально подходит для использования дома, в офисе, в автомобиле.

Водители, совершающие длительные поездки, в течение которых шейные мышцы особенно напряжены, по достоинству оценят преимущество подушки-массажера Gezatone «Добрый попутчик», модель AMG392.

Подушка-массажер расслабляет мышцы шеи, плеч и спины. Функция массажа стимулирует приток крови к голове, что снимает чувство усталости и склонность ко сну, бодрит и поднимает тонус. Легко приводимая в действие подушка-массажер с автоматически меняющимся направлением движения роликами в течение 20-минутного цикла работы поможет устранить дискомфортные ощущения в области шеи и расслабить шейные мышцы, кроме того, позволит эффективно использовать время, проведенное в пробках, и в периоды кратковременного отдыха во время поездки.

В домашних условиях использование массирующей подушки также удобно и не требует дополнительного времени – ею можно пользоваться во время чтения или просмотра телевизора.



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



1. Сетевой адаптер
2. Адаптер питания от «прикуривателя» в автомобиле
3. Разъем для подключения адаптера (сетевого, автомобильного)

ФУНКЦИИ ПОДУШКИ-МАССАЖЕРА



4 встроенных массажных ролика в сочетании с ИК - излучением обеспечивают массаж глубоких тканей, эффективно снимают мышечное напряжение, усталость, улучшают микроциркуляцию, снимают синдром затекшей шеи, дарят Вам несравнимые моменты расслабления.


- ИК - излучение
- Автоматическая смена направления вращения массажных роликов позволяет выполнить процедуру расслабляющего массажа
- Автоматическое отключение подушки-массажера через 20 минут



МАССАЖ ШЕИ

Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал к области Вашей шеи. Легкий массаж способствует улучшению микроциркуляции шейного и прилегающих отделов, ускоряет метаболические процессы, снимает спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи.

Регулярное использование подушки-массажера способствует улучшению локальной микроциркуляции, в результате чего происходит снятие усталости и стресса.

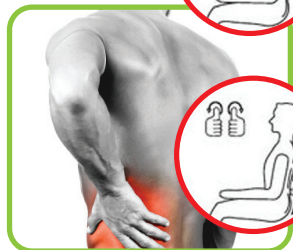

МАССАЖ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ

Убедитесь, что массажер плотно прилегает к области спины и поясницы. Разминающие движения помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего снимаются боли в спине и пояснице.

Регулярное использование подушки-массажера значительно улучшает локальное кровообращение, позволяет снять усталость, уменьшить боли в пояснице.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДУШКИ-МАССАЖЕРА

Использование в домашних условиях

Подключите сетевой адаптер к разьему на подушке-массажере.
Подключите подушку-массажер к сети.

Офисные работники/ студенты

Длительное использование компьютера ведет к отеку мышц.



Использование в автомобиле

Подключите шнур питания от прикуривателя к разьему подушки-массажера. Разьем от шнура питания подключите к прикуривателю автомобиля.

Пожилые люди

Слабость мышц и боли в спине.



Водители

Высокая нагрузка на плечи в связи с долгим вождением.



ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА



1. Включите подушку – массажер нажатием кнопки питания, расположенной в верхнем левом углу.
2. При включении аппарата массажные ролики высвечиваются красным и начинают вращаться.
3. Кратковременное нажатие кнопки питания во время работы массажера выключает режим ИК-нагрева.
4. По истечении 1 минуты вращение роликов приостанавливается.
5. Спустя несколько секунд их вращение возобновляется, но в противоположную сторону.
6. Чередование вращения продолжается 20 минут, после чего подушка – массажер выключается автоматически.

Для завершения выполнения программы массажа необходимо нажать и удерживать кнопку питания 3 секунды.

После 20 минут непрерывной работы массажера – подушки выключайте ее, по меньшей мере, на 30 минут для охлаждения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




- во время беременности;
- при наличии повреждений и заболеваний кожи, ожогов в месте воздействия;
- после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных средств, а также алкоголя;
- люди, использующие кардиостимуляторы должны получить разрешение врача на использование данного аппарата;
- при диабете следует получить разрешение врача на использование данного аппарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования массажера и сохраните ее на будущее!

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Всегда отключайте сетевой адаптер из розетки сразу после завершения использования аппарата и перед проведением обслуживания и чистки.
- Запрещается использование аппарата в помещении бассейна или душевой комнаты.
- Не располагайте аппарат или любую из его частей в местах, где есть риск их падения в воду.
- Не касайтесь и не пытайтесь извлечь упавший в воду аппарат до отключения сетевого адаптера из розетки.
- Запрещается любое дальнейшее использование аппарата, если произошло проникновение воды внутрь подушки-массажера, корпуса сетевого адаптера.
- Применяйте с аппаратом только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.
- Берегите аппарат и соединительные провода от соприкосновения с нагретыми поверхностями.
- Запрещается использовать во время сна.
Избегайте ситуаций, когда вы можете заснуть во время использования аппарата. Например, после приема успокоительных или снотворных препаратов, алкоголя.
- Если вы страдаете каким-либо заболеванием, не упомянутым в разделе «Противопоказания», перед использованием подушки-массажера проконсультируйтесь с врачом.
- Используйте аппарат только по его прямому назначению и строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

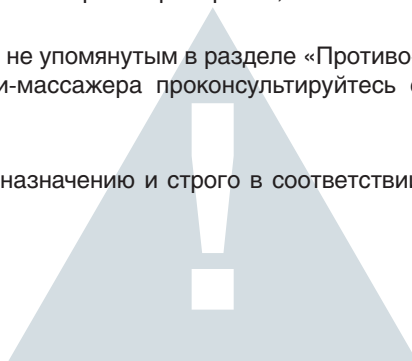

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Обязательно отключайте аппарат от сети и давайте ему остыть перед проведением обслуживания и чистки.
2. Тканевую поверхность подушки-массажера следует очищать мягкой, слегка влажной тканью. Никогда не погружайте подушку-массажер в жидкость и не позволяйте намокать.
3. Запрещается использовать для чистки аппарата абразивные средства, жесткие щетки, растворители, бензин, керосин, полироли.
4. Не сушите массажер-подушку на солнце или рядом с нагревательными приборами.
5. Запрещается подвергать массажер-подушку сухой химчистке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC 12 В, сетевой адаптер AC 220 В, 50 Гц / DC 12 В, 2.0 А

Потребляемая мощность: не более 24 Вт

Продолжительность непрерывной работы: 20 минут

Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C

Допустимый уровень влажности воздуха: < 80%

Размеры в упаковке: 470 x 160 x 440 мм

Вес в упаковке: 3,3 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Подушка-массажер – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Адаптер для питания
от «прикуривателя» автомобиля – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



time to *relax*

GÉZA *tone*