



Инструкция по эксплуатации

LUX 305

Назначение

Доска для ванны Ortonica Lux 305 предназначена для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте ortonica.ru

Указания по технике безопасности

- Рекомендуем перед началом использования доски для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.
- Не устанавливайте доску на наклонной поверхности.
- Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

Распаковка и сборка

Доска для ванной упакована в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Изделие не требует сборки, так как поставляется в собранном виде.

Эксплуатация доски для ванны

Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Установка

Установите доску на ванную. При необходимости отрегулируйте ширину рамы для соответствия вашей ванной.

Регулировки

Доску Lux 305 можно регулировать по ширине ванны. Чтобы изменить ширину рамы, необходимо ослабить фиксаторы, установить необходимый уровень и затянуть фиксаторы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Единый сервисный центр: 8 800 707-44-52


Доска для ванны Ortonica Lux 305

Изготовлено:

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd. Китай,
2018 год ОКПД 2 32.50.13.190

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2017/6447 от 09.11.2017 года

 8-800-500-14-14

 ortonica.ru

 vk.com/ortonica

 @ortonica