

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При продаже стетоскопа в гарантийный талон должна быть внесена отметка о продаже стетоскопа торгующей организацией с указанием даты продажи.

Условия предоставления гарантии

1. Срок действия гарантии на стетоскоп – 1 год с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается торгующей организацией в гарантийном талоне.
3. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты производства стетоскопа.
4. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего гарантийного талона в уполномоченных гарантийных мастерских.
5. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
6. Гарантия не распространяется на стетоскопы, поврежденные вследствие:
 - удара, небрежного обращения;
 - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
 - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.



Отметка о продаже торгующей организацией

Стетоскоп медицинский получен в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, с руководством по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений.

**Претензий к внешнему виду не имею.
С условиями действия гарантии ознакомлен.**

Подпись покупателя

В регионе Москвы и Московской области гарантийное обслуживание производится по адресу: РФ, Москва, 123007, Хорошевское шоссе, д.38г
Режим работы: понедельник - пятница с 10 до 17 часов;
перерыв с 12 до 13 часов.

Адреса сервисных центров в других регионах РФ указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе "Сервисные центры".

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте стетоскоп по адресу: РФ, г. Москва, 109028, ул. Яузская, д.1/15, стр.5.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

www.mos-amros.ru E-mail: info@mos-amros.ru

Отметки о ремонте:

AMRUS
Enterprises, Ltd.

Стетоскоп медицинский 04-AM400



**Терапевтический с двусторонней головкой
Classic**

Руководство по эксплуатации



Amrus Enterprises, Ltd.

Компания Amrus Enterprises, Ltd. предлагает широкий выбор медицинских стетоскопов для применения во всех типах лечебно-профилактических учреждений врачами-терапевтами и другими медицинскими специалистами.

Благодарим Вас за выбор изделий торговой марки Amrus®!

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Стетоскоп медицинский 04-AM400, терапевтический, категории Classic, с двусторонней терапевтической головкой, предназначен для выслушивания (аускультации) сердца, легких и других внутренних органов у взрослых пациентов.

Особенности:

- Двусторонняя вращающаяся головка из легкого алюминиевого сплава имеет большую чувствительную мембрану.
- Воронка с резиновым кольцом, не вызывает озноба.
- Удобный поворотный механизм переключения между рабочими поверхностями воронки и мембраны.
- Прочная Y-образная одноканальная звукопроводящая трубка, съемные хромированные бинауральные трубки с наружной пружиной.
- Изолирующие ушные оливки конической формы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр мембраны - 44 мм.

Диаметр воронки - 28 мм

Диаметр трубки - 9 мм.

Длина трубки - 550 мм.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Вставьте наконечники оголовья стетоскопа в уши. Ушные вкладыши поворачиваются для достижения комфортных условий работы. Легким постукиванием по мембране убедитесь в исправности и работоспособности стетоскопа. Звук должен быть четким и чистым.

Если Вы не услышали звука при постукивании по мембране, поверните головку стетоскопа на 180° до щелчка и повторите проверку. Таким поворотом на 180° производится переключение между рабочими сторонами головки стетоскопа.

Для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов прижмите головку стетоскопа мембраной или воронкой к телу в выбранной зоне.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГАРАНТИИ

Содержите стетоскоп в чистоте, не допуская загрязнения мембраны, засорения трубок и ушных оливок.

Стетоскопы должны храниться упакованными на стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от минус 40°C до плюс 50°C, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 метра. Запрещается хранение и транспортирование стетоскопов с маслами, кислотами, щелочами, органическими растворителями и другими агрессивными материалами.

Срок действия гарантии на стетоскоп – 1 год с даты продажи.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Головка стетоскопа в сборе.

Y-образная трубка.

Оголовье в сборе с пружиной и ушными оливами.

Руководство по эксплуатации.

Упаковочная коробка.

ДАнные О РЕГИСТРАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Производитель

«Амрус Энтерпрайзис, Лтд», США,
Amrus Enterprises, Ltd.,
720 King Georges Post Road, Suite 305,
Fords, New Jersey 08863, USA

Импортер / Организация, уполномоченная на принятие претензий

ЗАО фирма «Москва - Амрос»,
РФ, Москва, 115054, Пятницкая д. 71/5, стр.4

Место производства

Danyang Jianling Medical Appliance Co., Ltd.
Donfeng Village, Situ Town, Danyang City,
Jiangsu Province, PRC

Стетоскоп соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 (p.p. 3, 4)

Регистрационное удостоверение

№ P3N 2013/1049 от 14.08.2013

Срок службы стетоскопа

10 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к стетоскопу срок его службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию стетоскопа по истечении указанного срока службы или для проведения гарантийного обслуживания обратитесь по адресу, указанному торгующей организацией.