



## ПАСПОРТ

Поручень с 2-мя ступенями для ванной комнаты Belberg

Модель: ВВ-16

### ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом. Надежная работа изделия зависит от соблюдения приведенных в паспорте указаний.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер ступеней, см .....41 x 22,5 x 3,4  
Масса нетто, кг .....2,5  
Грузоподъемность, не более кг ..... 100  
Материал рамы ..... сталь  
Ножки имеют резиновые наконечники против скольжения  
Высота ступенек, см .....22 и 32

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поручень с 2-мя ступенями для ванной комнаты Belberg. шт ..... 1  
Паспорт, шт ..... 1



Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Поручень с 2-мя ступенями для ванной комнаты Belberg обеспечивает безопасность ежедневного использования санитарного приспособления. Рама выполнена из стальной круглой трубы и покрыта эпоксидной эмалью. Резиновые наконечники на всех 4-х ножках препятствуют скольжению, не оставляют следов на поверхности и обеспечивают безопасность пациента. Ступени выполнены из прочного пластика и имеют рифленую поверхность.


### ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:


1. Не допускать контакта изделия с нагревательными элементами, воздействию прямых солнечных лучей.

2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.


## СБОРКА

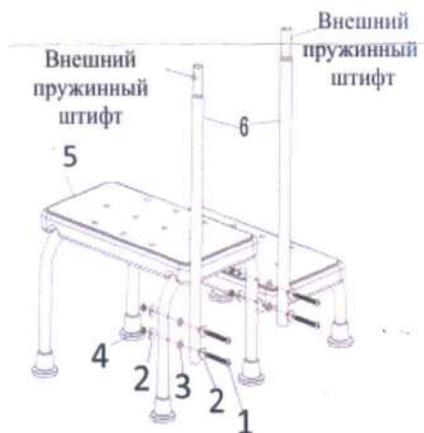

**Шаг 1:** Прикрепите две прямые трубки "6" к корпусу "5" с помощью винтов (как показано на рисунке), обратите внимание, чтобы пружинный штифт был повернут наружу. Используйте гаечный ключ, чтобы плотно закрутить гайку.

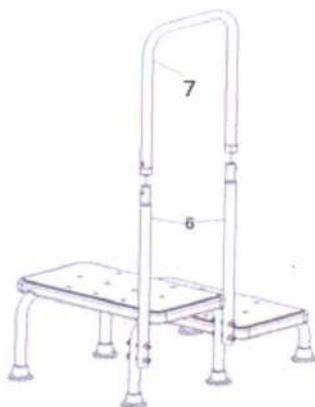

**Шаг 2:** Поместите U-образную трубу "7" в прямые трубки "6" до появления пружинного штифта в отверстии

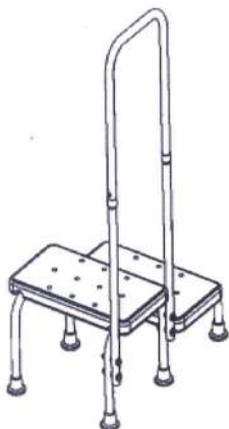

#### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Фирма-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи при выполнении требований и рекомендаций настоящем паспорте.

#### **Гарантия на изделие не действует в следующих случаях:**

- Гарантийный талон неправильно заполнен или подделан;
- Серийный номер (*если он предусмотрен для данного изделия*) поврежден или удален;
- Отсутствует товарно-финансовый документ (*товарная накладная*), подтверждающая факт покупки;
- Производилось вскрытие или ремонт изделий покупателем или не уполномоченным сервисным центром;
- Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки изделия, установленных нормативной и технической документацией на него, с указанием конкретных норм этой документации, которые нарушены;
- При попадании в изделие посторонних предметов или воды;
- При наличии на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, следов ударов, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки изделия или нахождения вблизи отопительных приборов;

- Дефекты являются результатом естественного износа (*сильное внешнее или внутреннее загрязнение, следы коррозии*);
- Предметом гарантии не являются быстроизнашивающиеся детали (*резиновые наконечники*)

**Made in CHINA**

Поставщик: ИП Гаврюсев Сергей Николаевич

Все замечания и предложения по качеству изделий просим Вас направлять по адресу: info@belberg.de

**Сервисный центр**

111141, Москва, ул. Кусковская 20А, офис 514А

Тел: +7 (926) 650-36-72

**Гарантийный Талон**

Название изделия	Поручень с 2-мя ступенями для ванной комнаты Belberg
Модель	ВВ-16
Дата продажи	____/____/____ Дата, месяц, год
Покупатель	Ф.И.О.: _____ Адрес: _____ Телефон: (____) _____
Продавец	Наименование: _____ Телефон: (____) _____ М.П.